

APESIN rapid plus

Flüssiger Kurzzeit-Flächendesinfektionsreiniger

Breites Wirkspektrum | Vielseitig | 2-in-1



Technische Information



Produktprofil

- APESIN rapid plus ist ein flüssiger Kurzzeit-Flächendesinfektionsreiniger für die gesamten institutionellen, medizinischen sowie lebensmittelverarbeitende Bereiche.
- Mit einem breiten Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen, Pilzen und Viren.
- Zur gleichzeitigen Desinfektion und Reinigung abwaschbarer Flächen und Gegenstände.
- APESIN rapid plus ist frei von Duftstoffen.
- Die kurzen Einwirkzeiten von APESIN rapid plus ermöglichen effiziente Arbeitsabläufe.



pH-Wert



Anwendungsbereich

- APESIN rapid plus ist im Nasswischverfahren (mit Mechanik) anzuwenden.
- Die zu desinfizierende Fläche mit der jeweiligen Gebrauchslösung satt und vollständig benetzend wischen und nicht nachtrocknen.
- Befolgen Sie die angegebenen Einwirkzeiten der jeweiligen Produktkonzentrationen (siehe Seite 2).
- Oberflächen mit Lebensmittelkontakt nach Verwendung und Einwirkzeit mit Leitungswasser spülen.
- APESIN rapid plus ist u.a. für Flächen und Gegenstände aus z.B. PA/POM, Acrylglas, VA-Stahl geeignet. Vor Gebrauch auf unauffälliger Stelle prüfen.
- Nicht auf Metallen wie z.B. Messing, Kupfer oder Aluminium anwendbar.
- BAuA Reg.-Nr. N-103235

Inhaltsstoffe, Umgang, Lagerung und Entsorgung

Alle Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Verkaufseinheit:

716035 - 2 x 5 l

716033 - 4 x 2 l


Unternehmenszertifikate für Managementsysteme



Anwendung und Dosierung




Dosierung in Abhängigkeit der Anwendung und dem Grad der Verschmutzung. Bitte beachten Sie die Hinweise und die Dosierungstabelle.

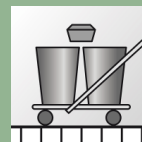

Unterhaltsreinigung

Boden mit sauberem Wischbezug nass wischen.

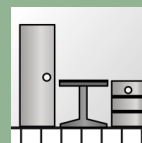

Oberflächenreinigung

Fläche nass mit sauberem Tuch abwischen.

