


APESIN multi QUICK & EASY

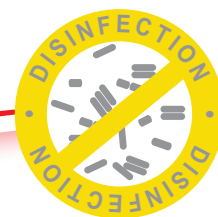

Putojošs universālais dezinfekcijas līdzeklis

■ Daudzpusējs ■ Drošs ■ Ļoti efektīvs

Produkta apraksts

- Universāls dezinfekcijas līdzeklis ar plašu iedarbību pret baktērijām, rauga sēnīti, vīrusiem (noteikta veida) un sēnītēm veselības aprūpes, iestāžu un sabiedriskās telpās.
- APESIN multi Quick & Easy nodrošina efektīvus dezinfekcijas un tīrīšanas rezultātus ar vienu darbību.
- Ļoti koncentrētā formula samazina transportēšanas svaru un ļauj samazināt inventāra apjomu.
- Quick & Easy pārvietojamā dozēšanas sistēma piedāvā precīzu un drošu dozēšanu.
- Bez krāsvielām un parfīmiem.
- Atbrīvojoties no tādām sastāvdaļām kā aldehīdiem, fenola, spirta un hlorīna, nav kaitinošā aromāta.
- Nav aerosola, pateicoties novatoriskajam putu risinājumam, tāpēc ideāli piemērots izmantošanai lielās zonās.
- Tā kā uzklāšana ir bez KLP, tas nodrošina maksimālu drošumu lietotājam.
- Saderība ar ādu ir klīniski pārbaudīta.

Pielietojuma sfēra

- APESIN multi Quick & Easy ir piemērots cietām virsmām.
- Plaši pielietojams sabiedriskajās telpās uz visām ūdens noturīgajām virsmām, piem. ofisos, sporta klubos, solārijos u.c.
- Piemērots izmantošanai aprūpes namos, ārstu ķirurģiskajos kabinetos un veco ļaužu namos.
- Sanitārajās zonās, kur ir nepieciešama kaļķakmens izšķīdināšana, izmantojiet, piemēram, SANET daily Quick & Easy, kas ir īpaši piemērots kaļķakmens ziepju noņemšanai un pēc lietošanas atstāj patīkamu citrona aromātu.
- Augsta savietojamība uz vispārējiem plastmasas materiāliem, piemēram, PMMA/polimetila metakrilāta Plexiglas 8N, POM/polioksimetilēna Hostaform veida C 9021, veids 13021.
- Izcila savietojamība uz elektropārkļājuma virsmām, piemēram, hroma, nerūsošā tērauda un misiņa, kā arī uz stikla.

Piezīme par

- Katram APESIN produktam izmantojiet atsevišķu trigeri, kā arī atšķiršanai lietojiet uzlīmi.
- Uzlieciet putas uz drānas un pilnībā samitriniet virsmu.
- Pietiekami samitriniet drānu ar APEIM multi Quick & Easy, lai nodrošinātu atbilstošu virsmas mitrumu.
- Ļaujiet šķīdumam iedarboties vismaz 1 minūti.
- Leteicams pēc darba dienas iztukšot ūdens pudeli un uzpildīt tajā svaigu ūdeni pirms nākamās lietošanas.
- Papildinformāciju skatiet nākamajā lappusē: Aktivitātes standarti un spektrs.

Ingredient declaration

100 g satur 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% nejonu virsmaktīvajām vielām

Ilgspējīga attīstība un ražošana



Produkta drošība, uzglabāšana un ar vidi saistītie norādījumi

Drošība: Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.

Vide: Iesaņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

Preces vienības:

Pasūtījuma Nr. 714319 6 x 325 ml

pH vērtība



Jūsu uzticams partneris
objektā:



Lietošana un dozēšana




APESIN multi Quick & Easy izmantojiet atsevišķu trigeri.



Dozējiet atbilstoši datiem nodaļā „Izmantošana”. Izpildiet turpmāk sniegtās norādes.



Pēc darba dienas iztukšojiet ūdens pudeli.

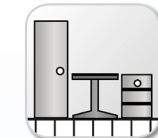

Virsmas dezinfekcija/tīrīšana: uzlieciet putas uz drānas un pilnībā samitriniet virsmu.



Specifiska dezinfekcija: piemērota zonām ar specifiskām higiēnas prasībām.




Sanitārā dezinfekcija: Uzklājiet putas uz drānas un pilnībā samitriniet virsmu.



Sanitārā tīrīšana: Pastiprinātai kaļķakmens noņemšanai, kā pulveri pirms dezinfekcijas lietojiet, piemēram, SANET daily Quick & Easy.



APESIN multi **QUICK & EASY**

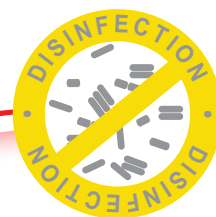

Putojošs universālais dezinfekcijas līdzeklis

Virsmas dezinfekcija:		kontakta laiks			
Pārtikas apstrādes zonas / rūpnieciskās zonas un		1 Min.	5 Min.	15 Min.	30 Min.

baktericīda iedarbība					
EN 1276	augsta organiskā slodze		X		
EN 13697	augsta organiskā slodze		X		
pretrauga sēnīšu iedarbība					
EN 1650	augsta organiskā slodze		X		
EN 13697	augsta organiskā slodze			X	

Virsmas dezinfekcija:		kontakta laiks			
Veselības aprūpes zonas		1 Min.	5 Min.	15 Min.	30 Min.

baktericīda iedarbība					
EN 13727	augsta organiskā slodze	X			
EN 16615	augsta organiskā slodze	X			
EN 13624	augsta organiskā slodze	X			
EN 16615	augsta organiskā slodze	X			
EN 13624	augsta organiskā slodze				X
EN 16615	augsta organiskā slodze				X
virucīda iedarbība					
EN 14476 efektīva iedarbība pret apvalkotajiem vīrusiem (tostarp HIV, HBV, HCV)	augsta organiskā slodze	X			
EN 14476 noteikta veida virucīda iedarbība	augsta organiskā slodze				X
EN 14476 individuāls testa organisms					
Adenovīruss	augsta organiskā slodze				X
Peļu norovīruss (Murine Norovirus)	augsta organiskā slodze		X		
Rotavīruss	bez organiskās slodzes	X			
Vakcīnija vīruss	augsta organiskā slodze	X			

Quick & Easy sistēma automātiski nodrošina pareizu min. 10% (v/v) šķīdumu no produkta koncentrāta.

