


# APESIN spray F

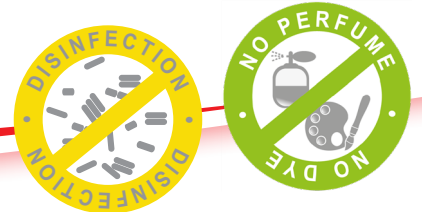

## Flytende alkoholbasert desinfeksjonsmiddel med rask virkning, væske - parfymefri

- Hurtigvirkende
- Inneholder ikke farge - og duftstoffer

### Produktprofil

- APESIN spray F er et hurtigvirkende desinfeksjonsmiddel mot bakterier og gjærsopp og har begrenset virusdrepende virkning.
- Egnet for alle alkoholbestandige overflater og møbler i helsevesenet, samt i områder for matproduksjon.
- Områder i direkte kontakt med mat må skylles med drikkevann før bruk.
- APESIN spray F inneholder ikke klorin, aldehyd eller fenol.

### Anvendelsesområde

- APESIN spray F kan også brukes på madrasser, senger, transporttraller, kliniske avfallsbeholdere, tepper og listverk på bad; søppelkasser, toalettseter, dørhåndtak, møbler og arbeidsflater, gelendre, sko samt steder som er vanskelige å nå.
- Også egnet for rengjøring av beholdere for kutteredskaper. Passer best for kniver, støvler og rengjøringsmaskiner.
- APESIN spray F kan brukes på aluminiumsoverflater.
- Skal ikke brukes på alkoholsensitive materialer (f.eks. pleksiglass).
- Malte overflater: material kompatibilitet sjekkes på et skjult sted.

### Bruksmerknad

- Anvendes uførtynnet. Sprøytes direkte på gjenstander fra en avstand på 20 - 30 cm slik at overflaten er fullstendig fuktet, eller man sprøyter det på en ren vaskeklut med god sugeløse og vasker flaten med den fullstendig.
- Maks. 50 ml/m<sup>2</sup>. Ikke spray på store flater (maks. 2 m<sup>2</sup>).
- La løsningen virke en stund. For detaljert informasjon og eksponeringstid, se neste side: Standarder & effektspekter.

### Ingredienser

Ingredienser per 100 g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

### Bærekraftig utvikling og produksjon



### Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

**Sikkerhet:** Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad. Bruk biosider forsvarlig.

Les alltid merkelappen og produkt informasjonen før bruk.

**Lagring:** Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

**Miljø:** Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

### Anvendelse og dosering



Følg instruksjonene under.



**Konsentret**  
**For desinfeksjon:**  
Egnet for områder med spesifikke hygiene-krav.



**Konsentret**  
**Påføring av spray:**  
Spray på en ren klut og påfør overflaten eller spray direkte på overflaten.



**Overfladerengjøring:**  
tørk avoverflatene vått ellerfuktig med en renklut.



**Konsentret**  
**Toiletrenghing:**  
Rengjør og skyll overflatene.



**Konsentret**  
Ideell for påføring på overflater i kjøkkonområder.



### Salgsenheter::

Ordrenr. 714867      10 x 750 ml

Din pålitelige partner på stedet:



# APESIN spray F

Flytende alkoholbasert desinfeksjonsmiddel med rask virkning, væske - parfymefri

Overflatedesinfeksjon:		eksponeringsvarighet			
Næringsmiddelarealer / industrielle og institusjonelle arealer		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
<b>bakteriedrepende virkning</b>					
EN 1276	Høy organisk belastning		X		
EN 13697	Høy organisk belastning		X		
<b>gjærdrepende virkning</b>					
EN 1650	Høy organisk belastning		X		
EN 13697	Høy organisk belastning		X		
Overflatedesinfeksjon:		eksponeringsvarighet			
Helsearealer		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
<b>bakteriedrepende virkning</b>					
EN 13727	Høy organisk belastning	X			
EN 13697	Høy organisk belastning		X		
EN 16615	Høy organisk belastning		X		
<b>tuberkeldrepende virkning</b>					
EN 14348	Høy organisk belastning	X			
<b>gjærdrepende virkning</b>					
EN 13624	Høy organisk belastning	X			
EN 13697	Høy organisk belastning		X		
EN 16615	Høy organisk belastning		X		
<b>virusdrepende virkning</b>					
EEN 14476 virksom mot innkapslede virus	Høy organisk belastning	X			
EN 14476 virusdrepende virkning med begrenset	Høy organisk belastning				X
<b>EN 14476 individuelle testorganismer</b>					
Vacciniavirus	Høy organisk belastning	X			
Murint norovirus (MNV)	Høy organisk belastning			X	
Adenovirus	Høy organisk belastning				X

