

APESIN spray

Produkt w postaci ciecży przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej

- Szybkie działanie
- Wolny od barwników
- Certyfikowany

Profil produktu

- APESIN spray jest rekomendowany do dezynfekcji urządzeń, sprzętów i powierzchni w biurach, klinikach i gabinetach lekarskich.
- APESIN spray może być także stosowany na materace, stelaże łóżek, wózki, tace pod instrumenty chirurgiczne, maty do kąpielni, kosze na śmieci, sedesy, armatury, klamki i uchwyty drzwi, powierzchnie mebli, blaty robocze, poręcze, obuwie oraz wszelkie miejsca trudno dostępne.
- APESIN spray został przetestowany zgodnie z wytycznymi listy VAH.
- Nie zawiera chloru, aldehydów i fenoli.

Miejsce aplikacji

- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na alkohol (np. plexiglas).



Stosowanie i dozowanie



Postępować według poniższych instrukcji.



Stężony

Nadaje się do obszarów o szczególnych wymogach higienicznych.



Stężony

Czyszczenie toalet:
Wyczyścić deskę i obszar zewnętrzny toalety.



Stężony

Butelka ze spryskiwaczem:
Spryskać czystą ściereczką i przetrzeć powierzchnię.



Butelka ze spryskiwaczem:
Max. 50 mL/m². Nie stosować na dużych powierzchniach (max. 2m)

Skład

Składniki na 100 gr: 70g ISOPROPYL ALCOHOL, 0,1g LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, kompozycje zapachowe

	Dozowanie/ Czas działania			
	30 Sec.	1 Min.	5 Min.	15 Min.
Warunki czyste (wg. DGHM-VAH)			konc.	
Warunki brudne (wg. DGHM-VAH)			konc.	
Szybka dezynfekcja*		konc.		
TBC Warunki czyste/ brudne (wg. DGHM-VAH)			konc.	
TBC** Szybka dezynfekcja		konc.		
Ograniczone wirusobójcze: DW, HBV, HIV, HCV i zwierzęca, ludzka grypa A/np. Wirusy H1N1, H3N8		konc.		
Rotawirusy		konc.		
Norowirusy				konc.
* Szybka dezynfekcja wg metody DGHM-VAH w warunkach czystych/brudnych				
** Szybka dezynfekcja wg metody DGHM-VAH w warunkach czystych/brudnych				
Dezaktywacja wszystkich oplaszczonych wirusów				
Testowany zgodnie z normami europejskimi EN 1040, 1275, 1276, 1650, 13697				

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju



Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki Produktu. Ostrożnie stosować produkty biobójcze. Przed każdym użyciem przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.

Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713159 10X 750 ml trigger

Zaufany partner

Wartość pH

